

GABARITO  **OK**

ortoklear
ALINHADORES ESTÉTICOS

ESSA FERRAMENTA FOI DESENVOLVIDA COM O INTUITO DE AUXILIAR DENTISTAS COM PROCESSO DE **ESTIMATIVA** DA QUANTIDADE DE PLACAS DE ALINHADORES ORTOKLEAR NECESSÁRIAS PARA UM CASO.

VOCÊ PODE USAR ESTE GABARITO **COMPARANDO** O CASO DE SEU PACIENTE COM O CASO APRESENTADO NESTE DOCUMENTO.

CASOS SIMPLES
APENAS UMA ARCADA

ATÉ 10 ALINHADORES


CADA PLACA
Incisivos (máximo de 2 graus)
Caninos e pré-molares (1 a 1,5 graus)

MOVIMENTO	QUANTIDADE
APINHAMENTO	ATÉ 4 MM
ROTAÇÃO DE INCISIVOS	ATÉ 20 GRAUS
ROTAÇÃO DE CANINOS	ATÉ 10 GRAUS
ROTAÇÃO DE PRÉ-MOLARES	ATÉ 10 GRAUS
ROTAÇÃO DE MOLARES	ATÉ 15 GRAUS
EXTRUSÃO	ATÉ 1,5 MM
INTRUSÃO	ATÉ 1,5 MM
CORREÇÃO SAGITAL	ATÉ 2 MM
EXPANSÃO DENTÁRIA	ATÉ 1 MM


**CASOS SIMPLES
APENAS UMA ARCADA**

ATÉ 10 ALINHADORES


**APINHAMENTOS SUAVES
GIROVERSÕES SUAVES**

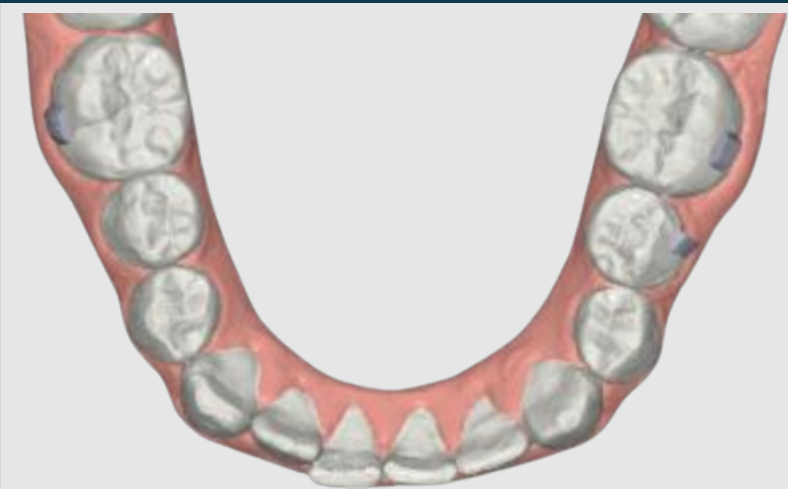


CASO 1

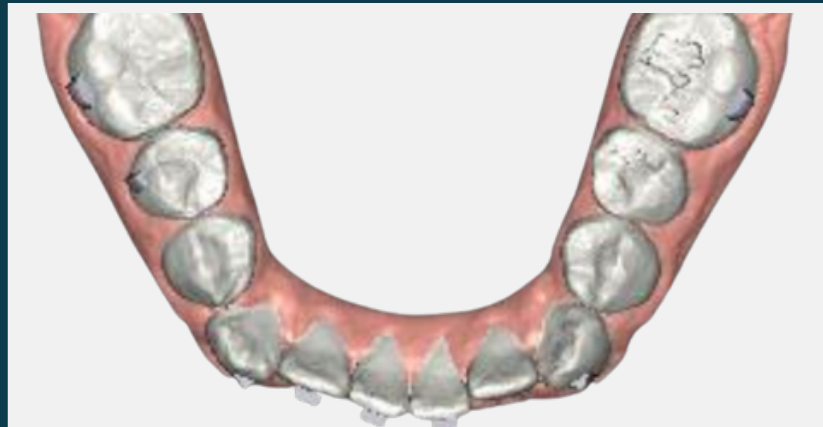

CASO 2

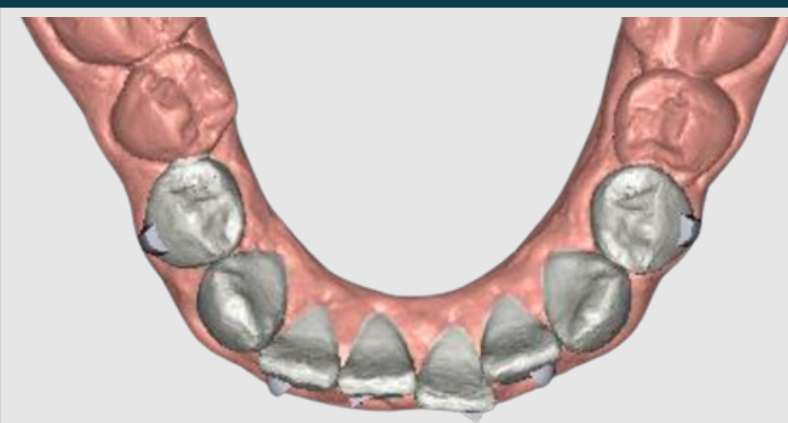

CASO 3

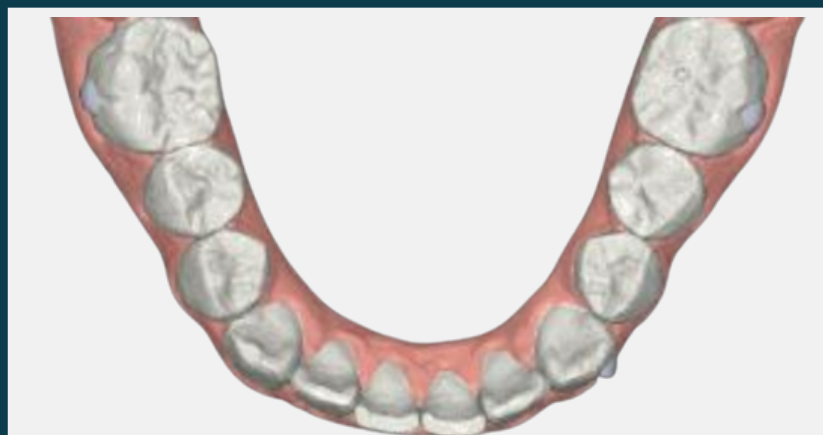

CASO 4


CASOS SIMPLES
APENAS UMA ARCADA
ATÉ 10 ALINHADORES

APINHAMENTOS SUAVES
GIROVERSÕES SUAVES

CASO 1



CASO 2

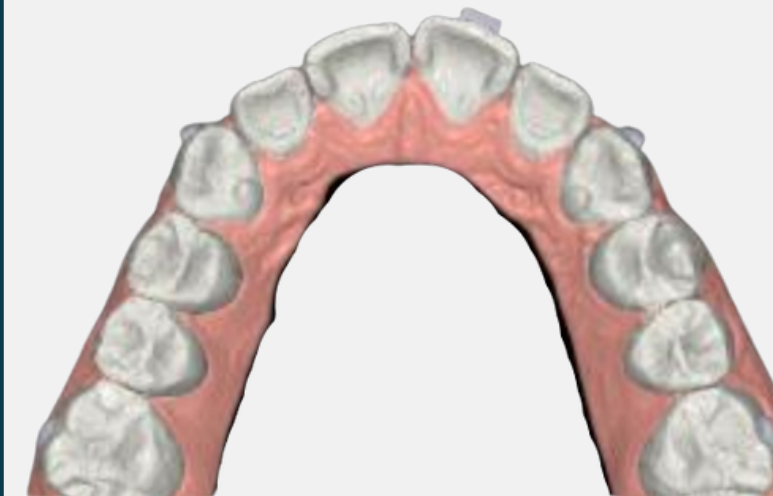

CASO 3



CASO 4



**CASOS SIMPLES
APENAS UMA ARCADA**

ATÉ 10 ALINHADORES

DIASTEMAS SUAVES

CASO 1



CASO 2





CASOS SIMPLES
DUAS ARCADAS

ATÉ 20 ALINHADORES

CASOS MODERADOS
APENAS UMA ARCADEA



MOVIMENTO	QUANTIDADE
APINHAMENTO	ATÉ 4-7 MM
ROTAÇÃO DE INCISIVOS	ATÉ 30 GRAUS
ROTAÇÃO DE CANINOS	ATÉ 20 GRAUS
ROTAÇÃO DE PRÉ-MOLARES	ATÉ 20 GRAUS
ROTAÇÃO DE MOLARES	ATÉ 20 GRAUS
EXTRUSÃO	ATÉ 3 MM
INTRUSÃO	ATÉ 3 MM
CORREÇÃO SAGITAL	ATÉ 3 MM
EXPANSÃO DENTÁRIA	ATÉ 1,5 A 2 MM

**CASOS SIMPLES
DUAS ARCADAS**




ATÉ 20 ALINHADORES

**CASOS MODERADOS
APENAS UMA ARCADEA**

20 ALINHADORES

11 SUPERIOR

09 INFERIOR

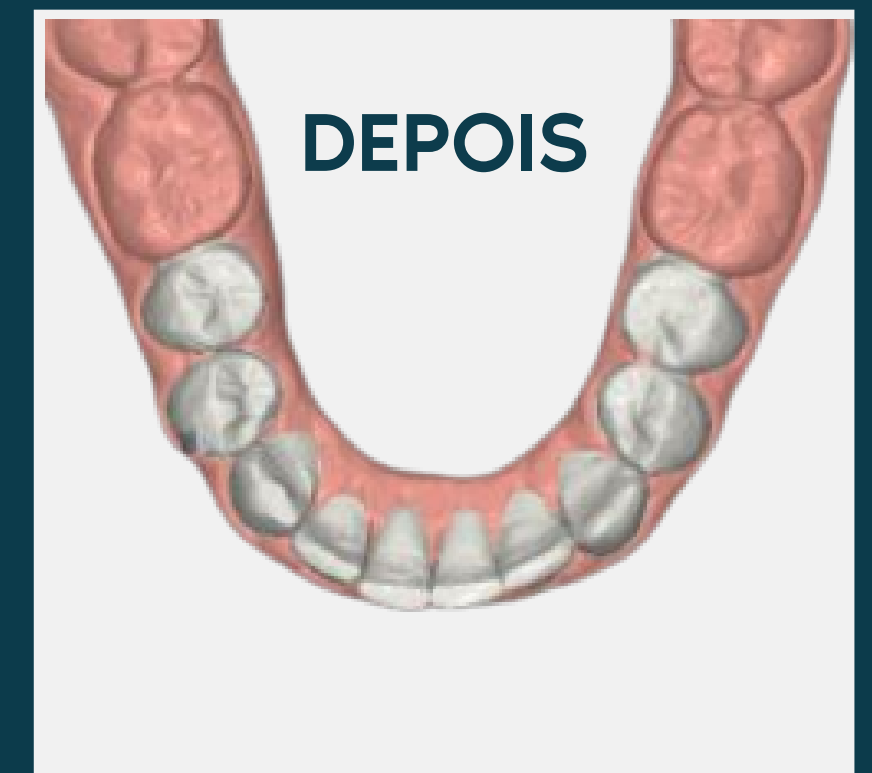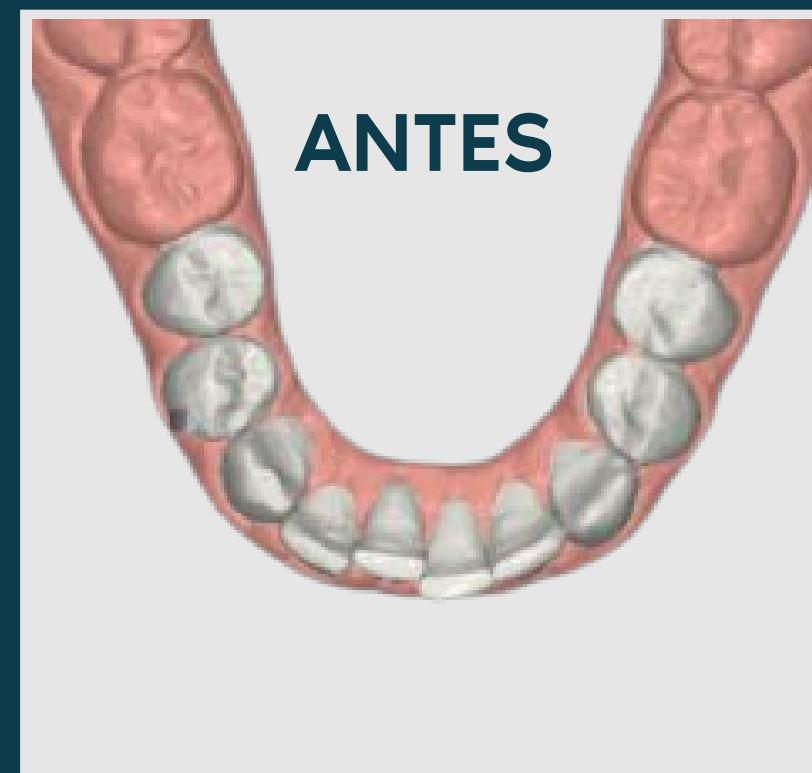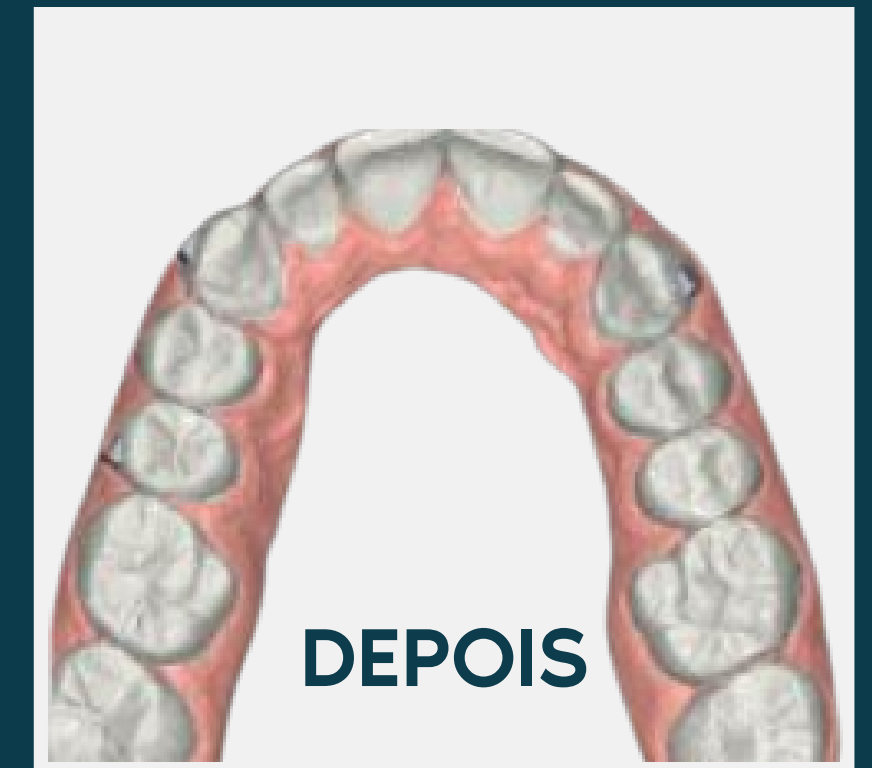

**CASOS SIMPLES
DUAS ARCADAS**

ATÉ 20 ALINHADORES

**CASOS MODERADOS
APENAS UMA ARCADEA**

18 ALINHADORES

06 SUPERIOR

12 INFERIOR



CASO ANTERIOR

CASOS SIMPLES
DUAS ARCADAS

ATÉ 20 ALINHADORES

CASOS MODERADOS
APENAS UMA ARCADEA

18 ALINHADORES
06 SUPERIOR
12 INFERIOR

31	32	33	34	35	36	37	38	TOOTH
10,8°	9,6°	-2,9°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	ROTATION
4,1°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TIP
0,8°	0,0°	2,9°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TORQUE
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INTRUSION
0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PROTRUDE
0,0	-0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MESIALIZE

41	42	43	44	45	46	47	48	TOOTH
21,4	4,0°	0,0°	18,8°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	ROTATION
7,9°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TIP
3,2°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TORQUE
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INTRUSION
0,6	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	PROTRUDE
0,4	0,2	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	MESIALIZE

APINHAMENTOS SUAVES
GIROVERSÕES SUAVES

CASOS SIMPLES
DUAS ARCADAS

ATÉ 20 ALINHADORES

CASOS MODERADOS
APENAS UMA ARCADEA

19 ALINHADORES
10 SUPERIOR
09 INFERIOR




APINHAMENTOS MODERADOS
GIROVERSÕES MODERADAS

CASOS SIMPLES
DUAS ARCADAS

ATÉ 20 ALINHADORES

CASOS MODERADOS
APENAS UMA ARCADEA

ALINHADORES
17 SUPERIORES

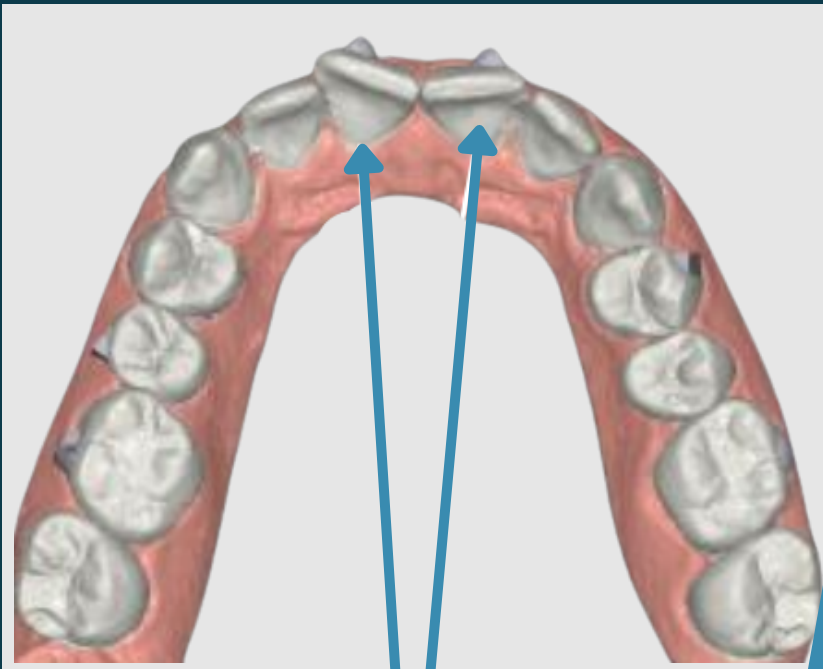

OBSERVA O QUANDO
ETÃO GIRADOS
OS INCISIVOS

11	12	13	14	15	16	17	18	TOOTH
25,8	10,8°	0,0°	0,0°	11,8°	10,8°	0,0°	0,0°	ROTATION
1,6°	-1,2°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0	0,0°	0,0°	TIP
6,9°	6,3°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0	0,0°	0,0°	TORQUE
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	INTRUSION
0,7	0,1	0,0	0,6	0,8	1,7	0,0	0,0	PROTRUDE
0,4	-0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,1	0,0	0,0	MESIALIZE

21	22	23	24	25	26	27	28	TOOTH
20,4°	-7,1°	0,0°	-16,3°	-7,8°	0,0°	0,0°	0,0°	ROTATION
-0,2°	1,2°	0,0°	3,0°	1,8°	0,0°	0,0°	0,0°	TIP
8,7°	9,7°	5,8°	10,2°	12,8°	0,0°	0,0°	0,0°	TORQUE
0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	INTRUSION
0,8	0,0	0,2	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	PROTRUDE
0,5	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	MESIALIZE

CASOS MODERADOS
DUAS ARCADAS

ATÉ 40 ALINHADORES



MOVIMENTO	QUANTIDADE
APINHAMENTO	ATÉ 4-7 MM
ROTAÇÃO DE INCISIVOS	ATÉ 30 GRAUS
ROTAÇÃO DE CANINOS	ATÉ 20 GRAUS
ROTAÇÃO DE PRÉ-MOLARES	ATÉ 20 GRAUS
ROTAÇÃO DE MOLARES	ATÉ 20 GRAUS
EXTRUSÃO	ATÉ 3 MM
INTRUSÃO	ATÉ 3 MM
CORREÇÃO SAGITAL	ATÉ 3 MM
EXPANSÃO DENTÁRIA	ATÉ 1,5 A 2 MM

SOBREMORDIDA PROFUNDA
ESPAÇOS PEQUENOS

CASOS MODERADOS
DUAS ARCADAS

ATÉ 40 ALINHADORES

28 ALINHADORES
13 SUPERIOR
15 INFERIOR

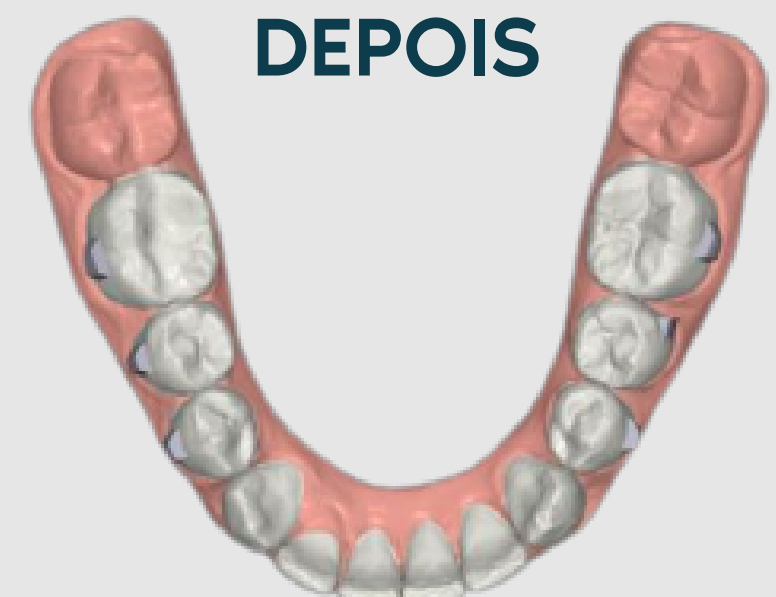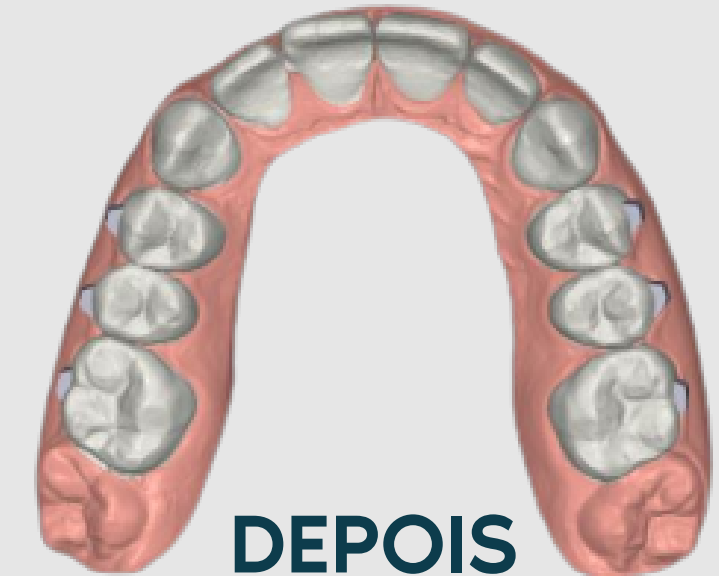

CASO ANTERIOR

CASOS MODERADOS

DUAS ARCADAS

ATÉ 40 ALINHADORES

11	12	13	14	15	16	17	18	TOOTH
6,6°	0,0°	-3,5°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	ROTATION
1,7°	0,0°	-0,2°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TIP
2,4°	3,2°	-5,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TORQUE
1,3	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INTRUSION
-1,7	-1,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PROTRUDE
0,9	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MESIALIZE

21	22	23	24	25	26	27	28	TOOTH
0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	-4,8°	0,0°	0,0°	0,0°	ROTATION
0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TIP
7,3°	3,1°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TORQUE
1,3	0,9	0,0	-0,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0	INTRUSION
-1,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PROTRUDE
0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	MESIALIZE

31	32	33	34	35	36	37	38	TOOTH
5,3°	0,0°	0,0°	15,8°	21,2°	0,0°	0,0°	0,0°	ROTATION
0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TIP
0,0°	2,1°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TORQUE
1,7	1,6	1,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	INTRUSION
0,3	0,3	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PROTRUDE
-0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	MESIALIZE

41	42	43	44	45	46	47	48	TOOTH
3,6°	0,0°	-3,6°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	ROTATION
1,8°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TIP
0,1°	0,0°	11,3°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	0,0°	TORQUE
1,4	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INTRUSION
-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PROTRUDE
0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MESIALIZE

28 ALINHADORES

13 SUPERIOR




15 INFERIOR

SUAVE INTRUSÃO MOLAR
APINHAMENTO MODERADO
EXPANSÃO DA ARCADA


CASOS MODERADOS
DUAS ARCADAS

ATÉ 40 ALINHADORES

30 ALINHADORES
17 SUPERIOR
13 INFERIOR

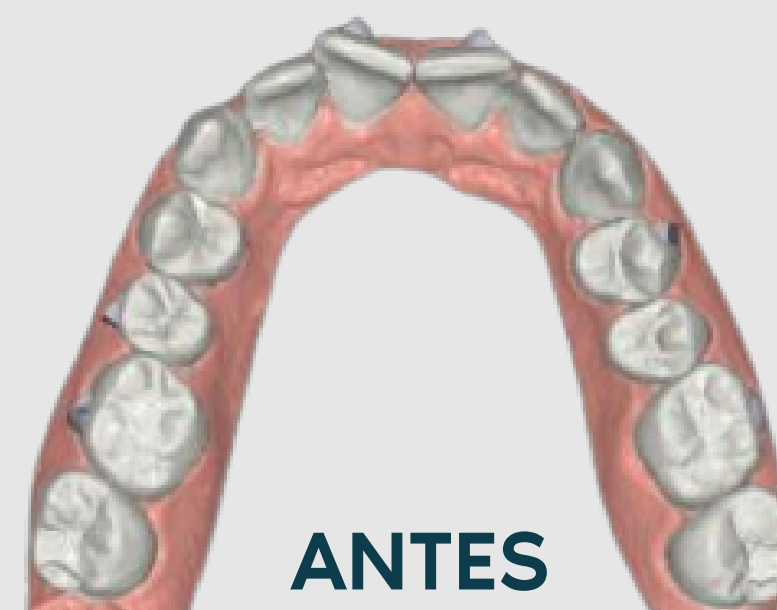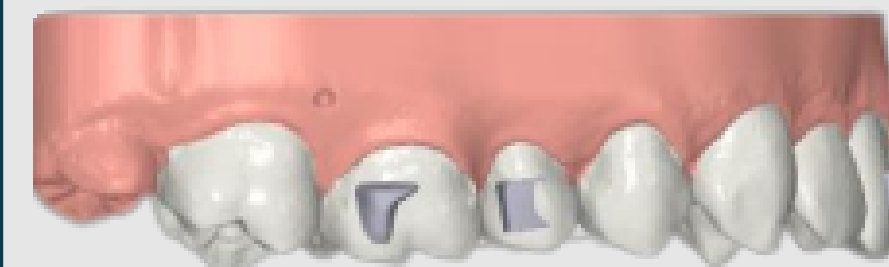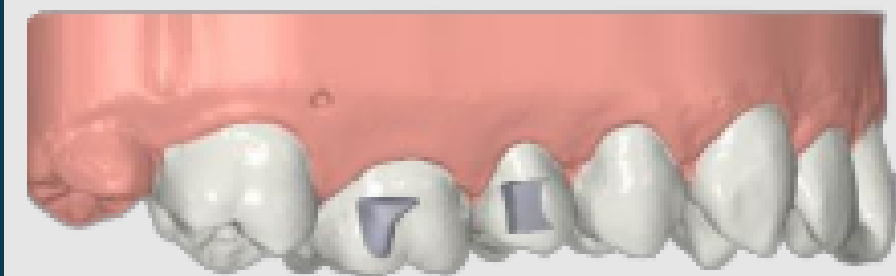

ANTES

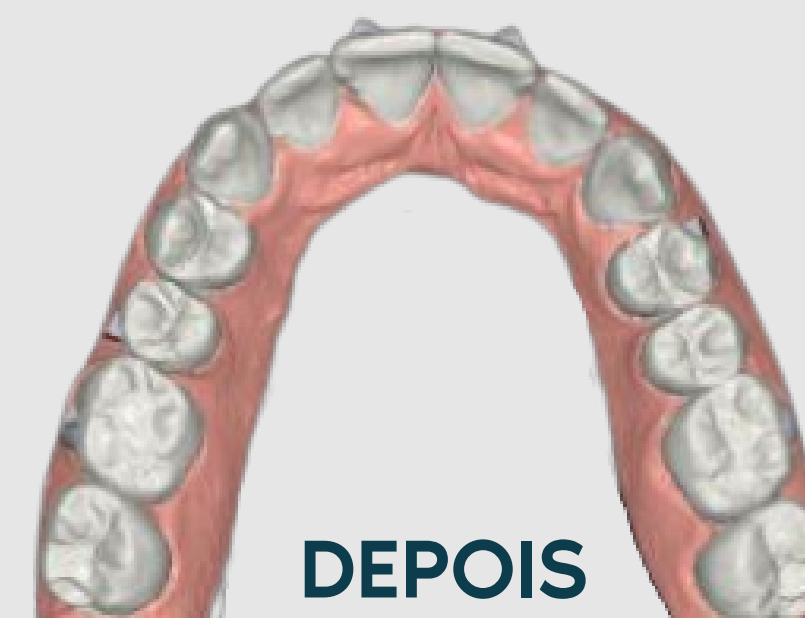

DEPOIS



ANTES




DEPOIS

EXTRUSÃO SUPERIOR
RETRAÇÃO INFERIOR


CASOS MODERADOS
DUAS ARCADAS

ATÉ 40 ALINHADORES

29 ALINHADORES
17 SUPERIOR
12 INFERIOR

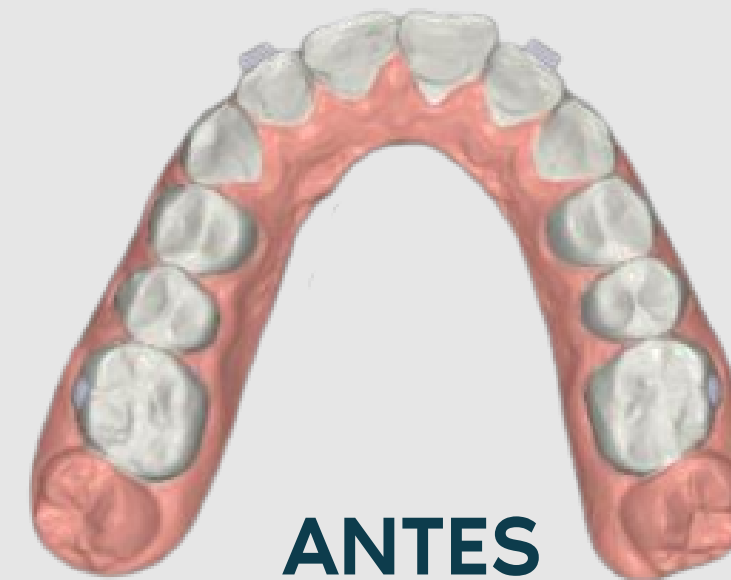

ANTES

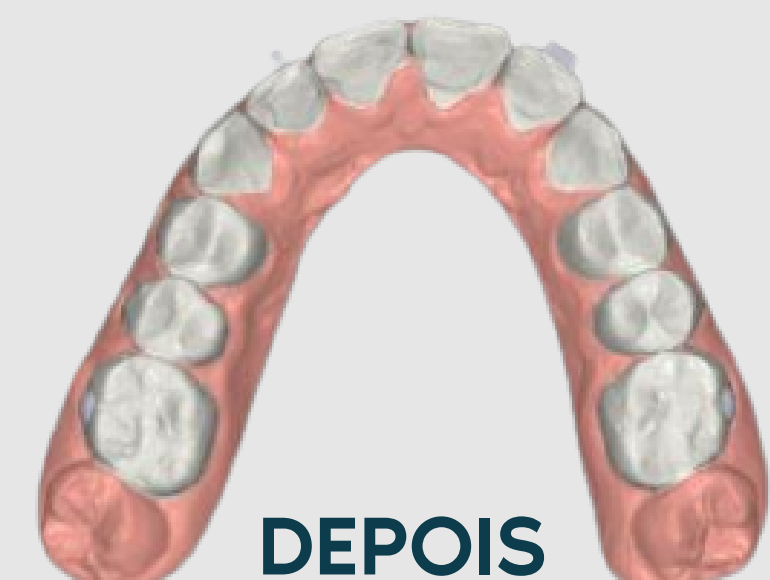


DEPOIS

ANTES



DEPOIS

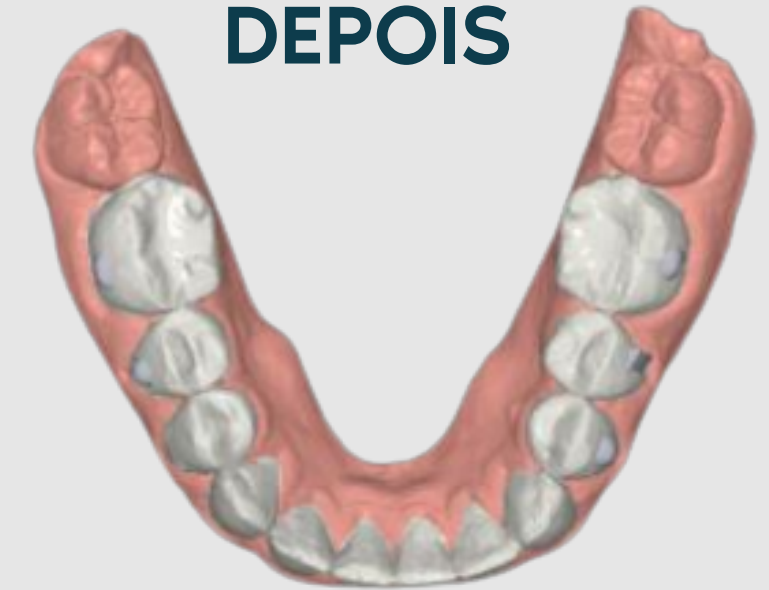


INTRUSÃO INFERIOR
EXPANSÕES DAS ARCADAS


CASOS MODERADOS
DUAS ARCADAS

ATÉ 40 ALINHADORES

32 ALINHADORES
13 SUPERIOR
19 INFERIOR

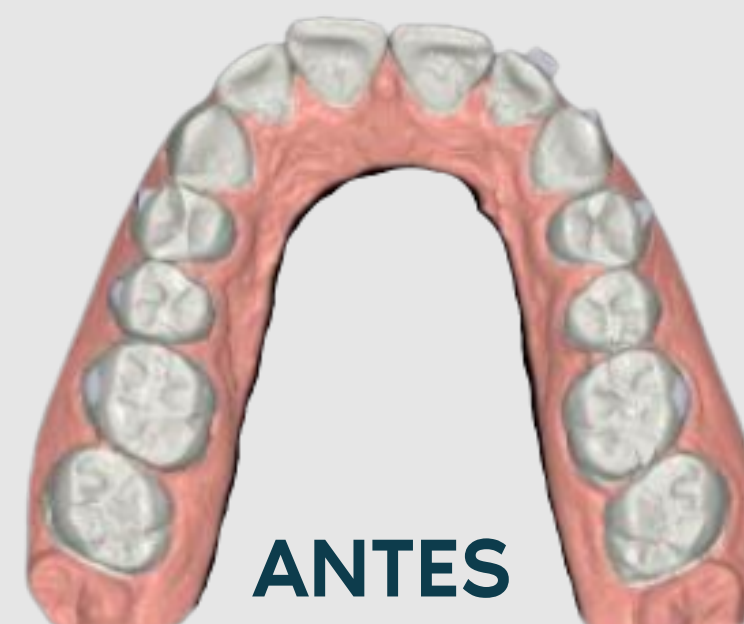


ANTES

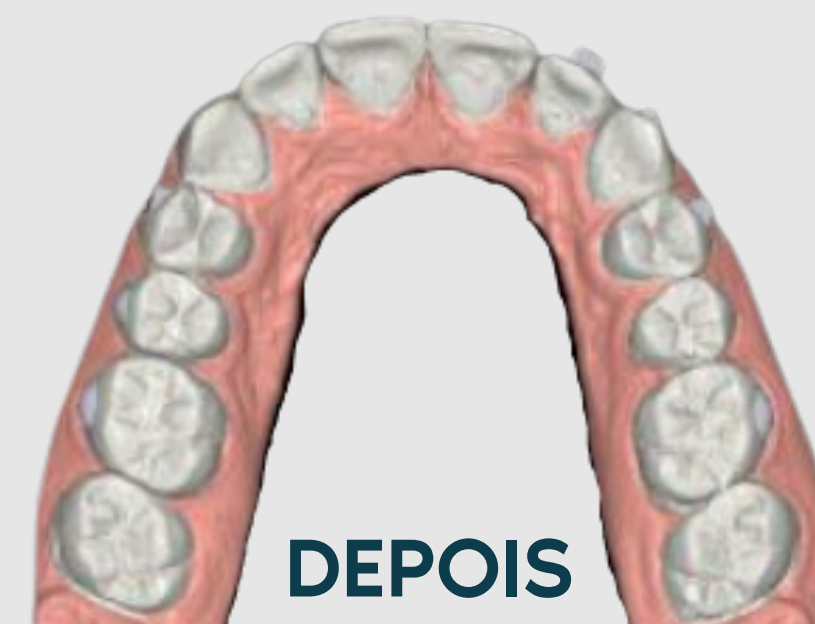

DEPOIS




ANTES

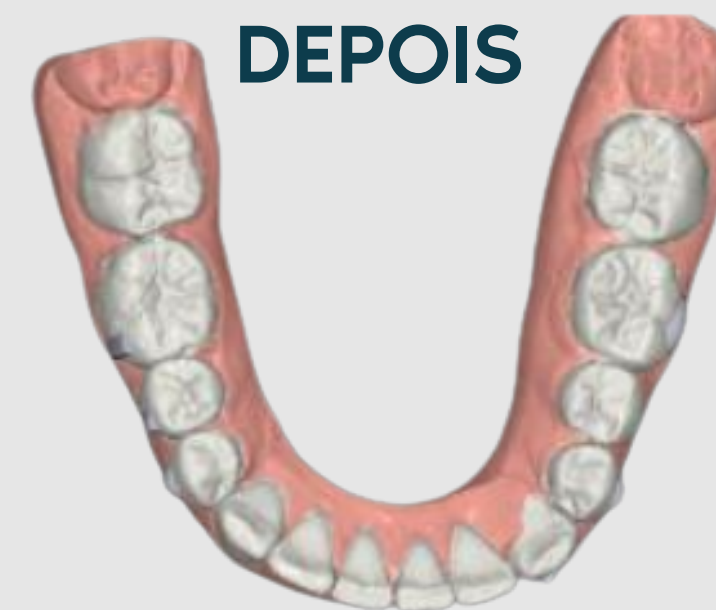


DEPOIS

**CASOS MODERADOS
DUAS ARCADAS
ATÉ 40 ALINHADORES**


**29 ALINHADORES
16 SUPERIOR
13 INFERIOR**

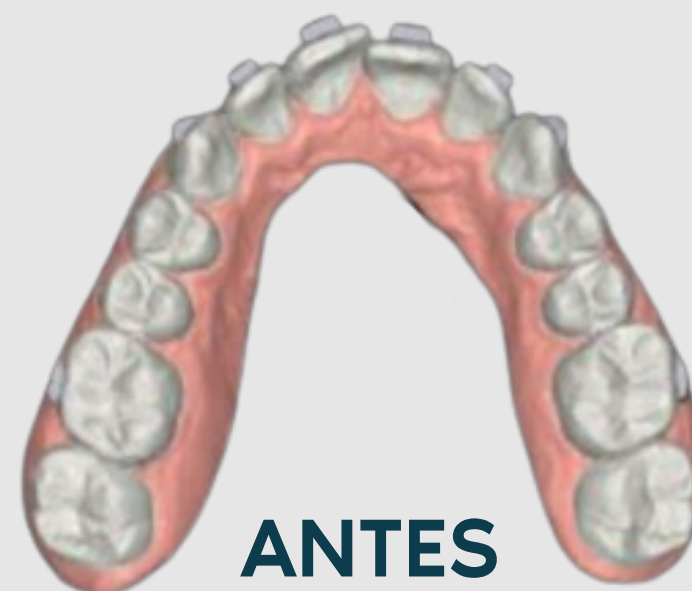


ANTES

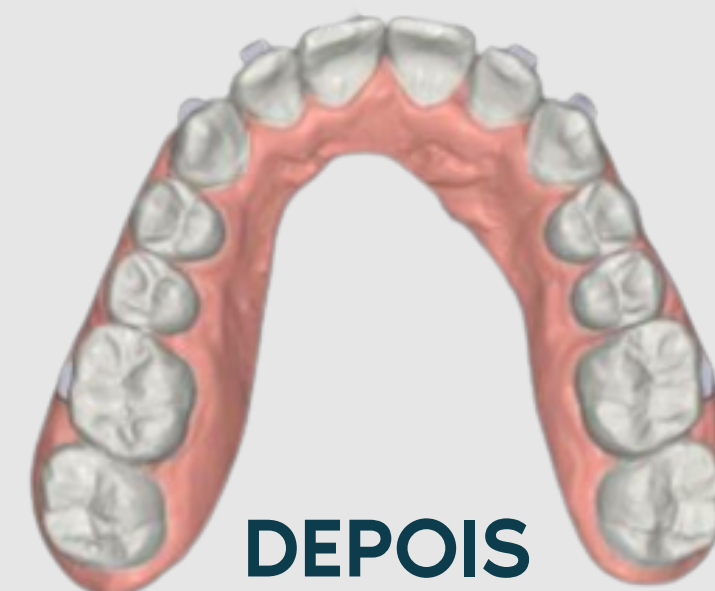

DEPOIS

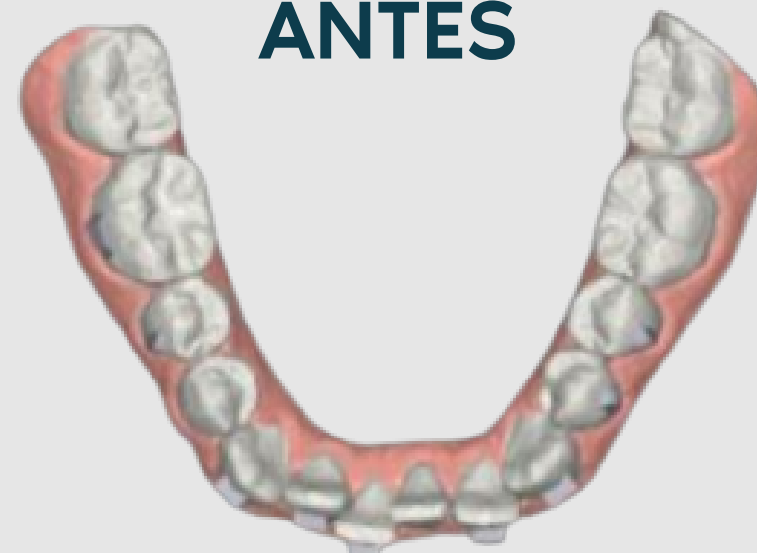

ANTES

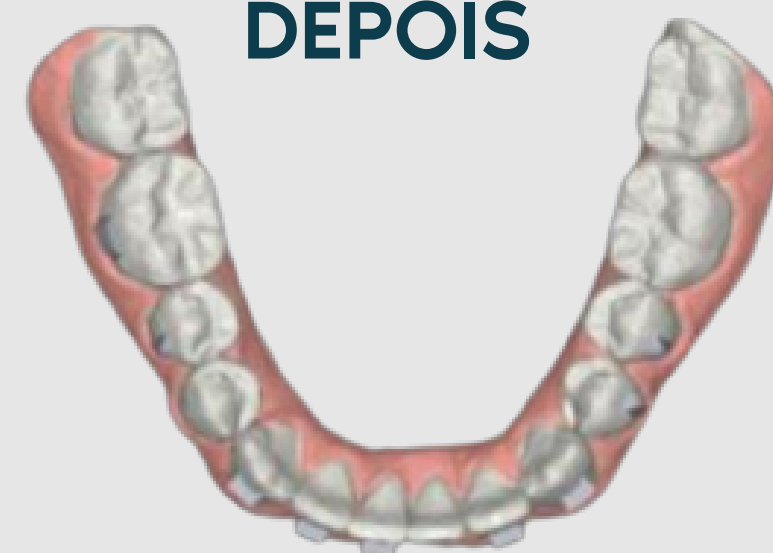

DEPOIS

GABARITO



COMERCIAL
(81) 98126-2200



DÚVIDAS E PRODUÇÃO
(81) 98102-8253

ortoklear
ALINHADORES ESTÉTICOS

ORTOKLEAR.COM.BR
@ORTOKLEAR